

# medi Posture plus force

## Utilização prevista

a medi Posture plus force é uma camisa para correção da postura corporal. O produto deve ser usado exclusivamente para tratamento da coluna vertebral e ser colocado apenas sobre pele intacta.

## Indicações

- Debilidades, má postura ou deficiências na coluna vertebral.
- Dores na coluna vertebral provocadas pela postura
- Debilidades musculares e/ou instabilidade das costas
- Cifose com dores crónicas nas costas
- Instabilidade secundária da cintura escapular devido a deficiências musculares
- Assimetria das escápulas

## Contra-indicações

Atualmente desconhecidos.

Se corretamente colocada, não existem contra-indicações.

Nas seguintes situações, deve consultar o seu médico, antes da colocação: Doenças ou lesões de pele na área de aplicação, particularmente sinais inflamatórios (aquecimento excessivo, inchaço ou vermelhidão).

## Funcionamento/instruções de aplicação

As faixas incorporadas no material provocam o endireitamento do tronco e, com isso, uma correção da postura corporal.

A musculatura do tronco e dos ombros é estimulada, sendo, por isso, contrariada a má postura, as debilidades musculares e/ou a instabilidade. Devido ao

fortalecimento inconsciente dos músculos, é possível aumentar a mobilidade e reduzir as dores.

Caso sinta dores insuportáveis ou desconforto durante a utilização, interrompa imediatamente a utilização e entre em contacto com o seu médico ou com a loja especializada.

## Instruções de colocação

Antes da primeira colocação, retire a película protetora antiderrapante em ambos os lados na zona dos ombros, na parte interior da camisa. Em seguida, vista-a como se fosse uma t-shirt.

## Instruções de lavagem

- Preferencialmente lave o produto à mão com detergente medi clean.
- Não usar branqueadores.
- Deixar secar ao ar.
- Não passar a ferro.
- Não limpar a seco.



## Conservação

Conserve em ambiente seco e proteja da exposição solar direta.

## Composição

Algodão, elastano, poliamida, polietileno, poliuretano

## Responsabilidade Civil

A responsabilidade civil do fabricante extingue-se em caso de uso indevido. Neste contexto, observe também as respetivas instruções de segurança e indicações existentes neste manual de instruções.

## Destruição

Para destruir coloque no lixo doméstico.