


Como tirar medidas?

MEDIDAS

Tirar sistematicamente as medidas a 100% dos pacientes, mesmo sendo uma renovação.

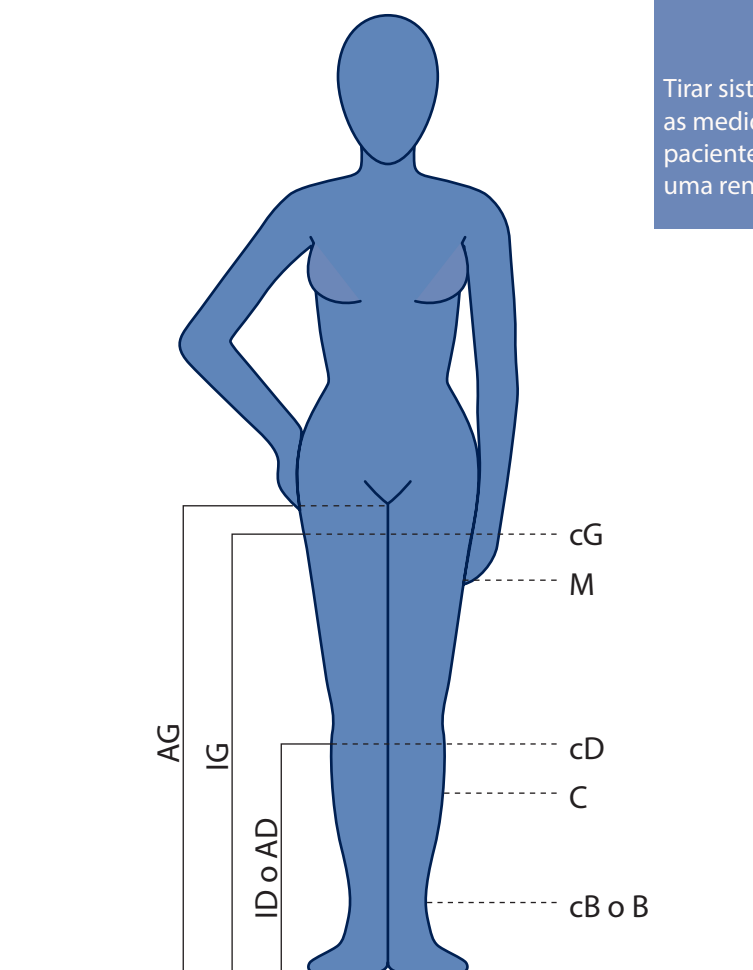

Medida Suíça:

Cotton, TFS, Top Fine, Traditional, etc.

Circunferência da perna

Direita/ Esquerda

cG /
medida da coxa - 5cm
abaixo da virilha (é a 2ª
medida para meias até à raiz
da coxa ou collant)

cD /
medida da barriga da perna
- 2 dedos abaixo do joelho (é
a 2ª medida para meias até
ao joelho)

cB /
medida do tornozelo - acima
do maléolo na zona + fina
(para todas as meias)

É a medida + importante. Deve ser
tirada de manhã, por um profissional
rigoroso, para garantir a maior eficácia.

Circunferência da perna

Direita/ Esquerda

IG /
do chão até 5cm abaixo da
virilha (para meias até à raiz
da coxa e para collant)


ID /
do chão até 2 dedos abaixo
do joelho (para meias até ao
joelho)

A altura deve ser medida com o utente
descalço.


Circunferência - medida que vai indicar o tamanho (xxs, xs, s, m, l, xl, xxl) conforme os modeloss.

Altura - medida que vai indicar a altura da meia (curto, normal, longo) conforme os modelos


Como calçar?

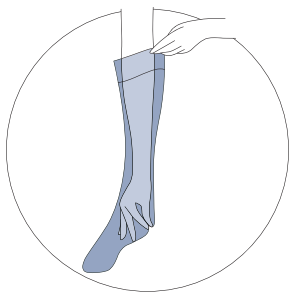


1 Introduza a mão no interior e aperte o calcanhar.

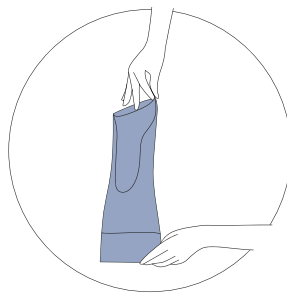

2 Vire a sua meia do avesso até ao calcanhar.

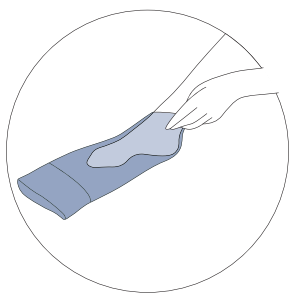

3 Introduza o pé na meia, posicionando corretamente o calcanhar.

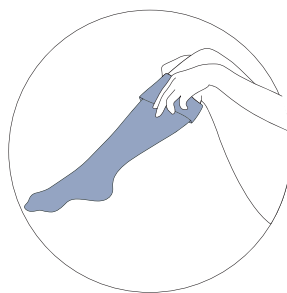

4 Desenrole a meia ao longo das pernas. Nas meias de maior elasticidade (principalmente meia francesa) nunca puxar na longitudinal.

A meia deve ficar bem colocada (calcanhar e altura) sem estar demasiado esticada e sem ter vincos.

Conselhos de Utilização

A compressão médica é o tratamento, de base, das doenças venosas e linfáticas. É indispensável o recurso a um profissional de saúde para garantir um nível de compressão adaptado e uma ótima eficácia.

As meias devem ser calçadas, de preferência logo de manhã, sobre uma pele limpa e seca. A eficácia das meias de compressão SIGVARIS é garantida durante 6 meses se as condições de utilização e manutenção forem respeitadas. Unhas bicudas e anéis produzem rapidamente defeitos que devem ser evitados, pois são exclusões da garantia do fabricante. Nunca cortar os fios soltos que aparecem no interior da meia.

Para um tratamento eficaz, recomenda-se a substituição das meias de compressão médica de 6 em 6 meses.

Instruções de Lavagem



Lave à mão ou à máquina, selecionando um programa para roupa delicada a 30° C.



Não utilize amaciador.



Deixe secar longe de qualquer fonte de calor.

Para prolongar o tempo de vida dos seus produtos, utilize uma rede de lavagem.

Aconselha-se a lavagem dos produtos antes da primeira utilização e sempre que sejam utilizadas.



CLASSE 1 - 18 a 21 mmHg

Top Fine Select

Poliamida - Elastano

PÉ FECHADO			
PÉ ABERTO			

· **TFS** - Gama pré seleccionada com os modelos mais vendidos e as cores mais comuns. Meia opaca de grande durabilidade.


- **PREÇO** - Atrativo.
- **QUALIDADE** - Suiça.

Tamanhos	Tornozelo cB	Gémeos cD	Coxa cG
S	19 a 23	28 a 34	42 a 52
S PLUS	19 a 23	32 a 38	50 a 60
M	23 a 26	31 a 37	50 a 60
M PLUS	23 a 26	36 a 42	58 a 68
L	26 a 29	34 a 40	58 a 68
L PLUS	26 a 29	40 a 46	66 a 76

CORES



Altura	Até ao joelho (ID)	Até à raiz da coxa (IG)	Collant (IG)
Curto	33 a 37	61 a 70	61 a 70
Longo	38 a 44	71 a 80	71 a 80

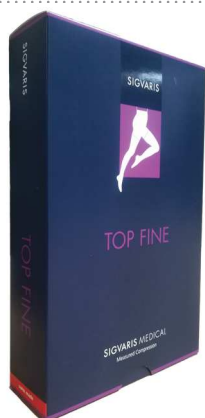

TOP FINE

Poliamida - Elastano

- A mesma malha; a mesma qualidade; outros modelos.
- Modelos AT (pé aberto; pé fechado).
- Modelos AF (pé aberto; pé fechado).
- Modelos AG com cinto.
- Modelos AG sem anti glisse.



CLASSE 2 - 23 a 32 mmHg

Top Fine Select

Poliamida - Elastano

PÉ FECHADO	■	■	■
PÉ ABERTO	■	■	

· **TFS** - Gama pré seleccionada com os modelos mais vendidos e as cores mais comuns. Meia opaca de grande durabilidade.

- **PREÇO** - Atrativo.
- **QUALIDADE** - Suiça.

Tamanhos	Tornozelo cB	Gémeos cD	Coxa cG
S	19 a 23	28 a 34	42 a 52
S PLUS	19 a 23	32 a 38	50 a 60
M	23 a 26	31 a 37	50 a 60
M PLUS	23 a 26	36 a 42	58 a 68
L	26 a 29	34 a 40	58 a 68
L PLUS	26 a 29	40 a 46	66 a 76

CORES



Altura	Até ao joelho (ID)	Até à raiz da coxa (IG)	Collant (IG)
Curto	33 a 37	61 a 70	61 a 70
Longo	38 a 44	71 a 80	71 a 80



TOP FINE

Poliamida - Elastano

- A mesma malha; a mesma qualidade; outros modelos.
- Modelos AT (pé aberto; pé fechado).
- Modelos AF (pé aberto; pé fechado).
- Modelos AG com cinto.
- Modelos AG sem anti glisse.