


Como tirar medidas?

MEDIDAS

Tirar sistematicamente as medidas a 100% dos pacientes, mesmo sendo uma renovação.

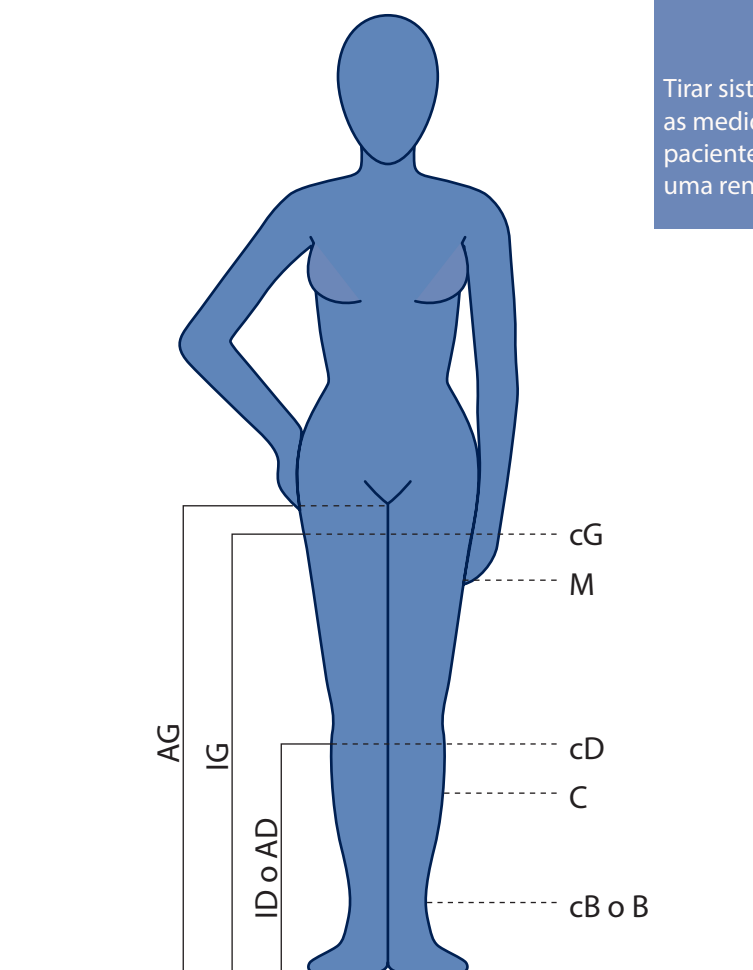

Medida Suíça:

Cotton, TFS, Top Fine, Traditional, etc.

Circunferência da perna

Direita/ Esquerda

cG /
medida da coxa - 5cm
abaixo da virilha (é a 2ª
medida para meias até à raiz
da coxa ou collant)

cD /
medida da barriga da perna
- 2 dedos abaixo do joelho (é
a 2ª medida para meias até
ao joelho)

cB /
medida do tornozelo - acima
do maléolo na zona + fina
(para todas as meias)

É a medida + importante. Deve ser
tirada de manhã, por um profissional
rigoroso, para garantir a maior eficácia.

Circunferência da perna

Direita/ Esquerda

IG /
do chão até 5cm abaixo da
virilha (para meias até à raiz
da coxa e para collant)


ID /
do chão até 2 dedos abaixo
do joelho (para meias até ao
joelho)

A altura deve ser medida com o utente
descalço.


Circunferência - medida que vai indicar o tamanho (xxs, xs, s, m, l, xl, xxl) conforme os modeloss.

Altura - medida que vai indicar a altura da meia (curto, normal, longo) conforme os modelos


Como calçar?

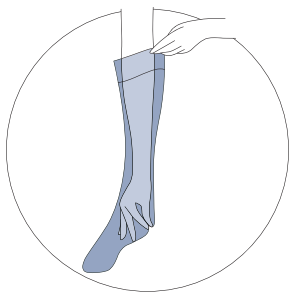


1 Introduza a mão no interior e aperte o calcanhar.

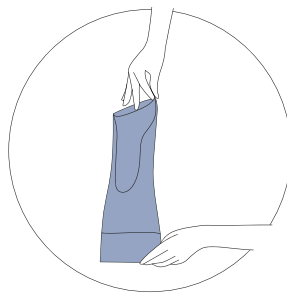

2 Vire a sua meia do avesso até ao calcanhar.

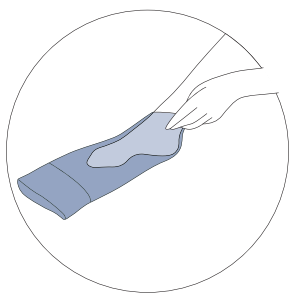

3 Introduza o pé na meia, posicionando corretamente o calcanhar.

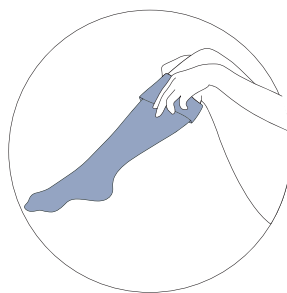

4 Desenrole a meia ao longo das pernas. Nas meias de maior elasticidade (principalmente meia francesa) nunca puxar na longitudinal.

A meia deve ficar bem colocada (calcanhar e altura) sem estar demasiado esticada e sem ter vincos.

Conselhos de Utilização

A compressão médica é o tratamento, de base, das doenças venosas e linfáticas. É indispensável o recurso a um profissional de saúde para garantir um nível de compressão adaptado e uma ótima eficácia.

As meias devem ser calçadas, de preferência logo de manhã, sobre uma pele limpa e seca. A eficácia das meias de compressão SIGVARIS é garantida durante 6 meses se as condições de utilização e manutenção forem respeitadas. Unhas bicudas e anéis produzem rapidamente defeitos que devem ser evitados, pois são exclusões da garantia do fabricante. Nunca cortar os fios soltos que aparecem no interior da meia.

Para um tratamento eficaz, recomenda-se a substituição das meias de compressão médica de 6 em 6 meses.

Instruções de Lavagem



Lave à mão ou à máquina, selecionando um programa para roupa delicada a 30° C.





Não utilize amaciador.



Deixe secar longe de qualquer fonte de calor.

Para prolongar o tempo de vida dos seus produtos, utilize uma rede de lavagem.

Aconselha-se a lavagem dos produtos antes da primeira utilização e sempre que sejam utilizadas.

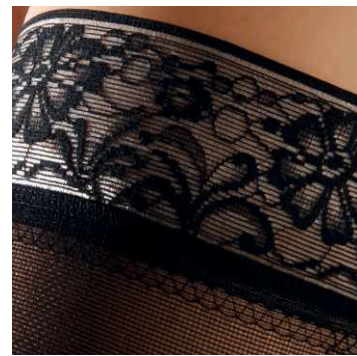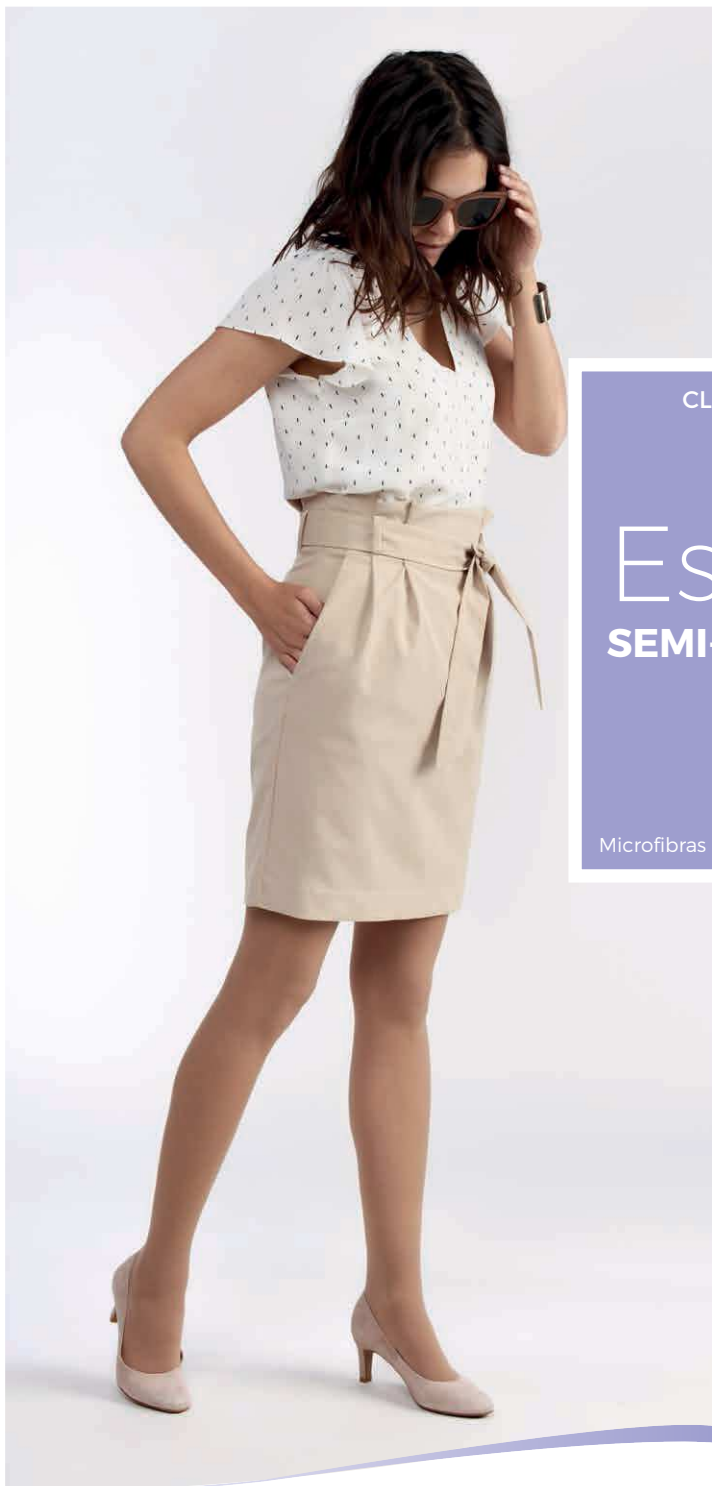

CLASSE 1 - 15 a 21 mmHg

Essentiel

SEMI-TRANSPARENTE

(DIAPHANE)

Microfibras de poliamida - Poliamida - Elastano

· **CONFORTO** - Aprovado por 91%* das utentes graças ao seu material altamente extensível.

· **ESTÉTICA** - Fácil de vestir e de usar em todas as situações. Adaptado a todas as morfologias.

· **SEMI-TRANSPARENTE.**

* Estudo comparativo realizado pela FEELTEST em 06/2014 com 30 mulheres.

CORES



Escritório



Saídas



Gravidez

	STANDARD	MORPHO -	MORPHO +	PÉ ABERTO
NATUREL	■	■	■	■*
DUNE	■	■	■	■*
ÉPICE	■	■	■	■*
CANELLE	■	■	■	■*
CHOCOLAT	■	■	■	■*
MARINE	■	■	■	■*
ENCRE	■	■	■	■*
BRUME	■	■	■	■*
NOIR	■	■	■	■*

* só em Dune, Encre e Noir



Tamanhos		Tornozelo B	Gémeos C	Morpho -	Morpho +
				Gémeos C	Gémeos C
Até ao joelho (AD)	XS	17 a 19	27 a 35	-	-
	S	19 a 22	30 a 38	22 a 30	38 a 46
	M	22 a 24	33 a 41	25 a 33	41 a 49
	L	24 a 26	37 a 45	29 a 37	45 a 53
	XL	26 a 29	40 a 48	32 a 40	48 a 56
	XXL	29 a 32	43 a 51	-	51 a 59



Tamanhos		Tornozelo B	Gémeos C	Coxa M	Morpho -		Morpho +	
					Gémeos C	Coxa M	Gémeos C	Coxa M
Até á raiz da coxa (AC)	XS	17 a 19	27 a 35	42 a 55	-	-	-	-
	S	19 a 22	30 a 38	45 a 58	26 a 34	35 a 45	34 a 42	58 a 68
	M	22 a 24	33 a 41	49 a 62	29 a 37	39 a 49	37 a 45	62 a 72
	L	24 a 26	37 a 45	54 a 67	33 a 41	44 a 54	41 a 49	67 a 77
	XL	26 a 29	40 a 48	56 a 69	36 a 44	46 a 56	44 a 52	69 a 79
	XXL	29 a 32	43 a 51	62 a 75	-	-	47 a 55	75 a 85



Tamanhos		Tornozelo B	Gémeos C	Coxa M	Anca	Anca Materna	Morpho +		
							Gémeos C	Coxa M	Anca
Collant	S	19 a 22	30 a 38	45 a 58	≤ 100	100 a 130	34 a 42	58 a 68	≤ 108
	M	22 a 24	33 a 41	49 a 62	≤ 107	107 a 140	37 a 45	62 a 72	≤ 118
	L	24 a 26	37 a 45	54 a 67	≤ 114	114 a 150	41 a 49	67 a 77	≤ 128
	XL	26 a 29	40 a 48	56 a 69	≤ 121	121 a 150	44 a 52	69 a 79	≤ 138
	XXL	29 a 32	43 a 51	62 a 75	≤ 121	-	47 a 55	75 a 85	≤ 138

Altura			
	1/2 Perna		Perna
	A - D	A - G	Tamanho
Normal	≤ 40	≤ 75	36/40
Longo	≥ 40	≥ 75	37/41



CLASSE 2 - 22 a 32 mmHg

Essentiel

SEMI-TRANSPARENTE

(DIAPHANE)

Microfibras de poliamida - Poliamida - Elastano

· **CONFORTO** - Aprovado por 91%* das utentes graças ao seu material altamente extensível.

· **ESTÉTICA** - Fácil de vestir e de usar em todas as situações. Adaptado a todas as morfologias.

· **SEMI-TRANSPARENTE.**

* Estudo comparativo realizado pela FEELTEST em 06/2014 com 30 mulheres.

CORES
























Escritório



Saídas



Gravidez

				
 	STANDARD			
 	MORPHO 			
 	MORPHO 			
	PÉ ABERTO			

Essentiel

SEMI-TRANSPARENTE

(DIAPHANE)



Tamanhos		Tornozelo B	Gêmeos C	Morpho -	Morpho +
				Gêmeos C	Gêmeos C
Até ao joelho (AD)	XS	17 a 19	27 a 35	-	-
	S	19 a 22	30 a 38	22 a 30	38 a 46
	M	22 a 24	33 a 41	25 a 33	41 a 49
	L	24 a 26	37 a 45	29 a 37	45 a 53
	XL	26 a 29	40 a 48	32 a 40	48 a 56
	XXL	29 a 32	43 a 51	-	-



Tamanhos		Tornozelo B	Gêmeos C	Coxa M	Morpho -		Morpho +	
					Gêmeos C	Coxa M	Gêmeos C	Coxa M
Até à raiz da coxa (AC)	XS	17 a 19	27 a 35	42 a 55	-	-	-	-
	S	19 a 22	30 a 38	45 a 58	26 a 34	35 a 45	34 a 42	58 a 68
	M	22 a 24	33 a 41	49 a 62	29 a 37	39 a 49	37 a 45	62 a 72
	L	24 a 26	37 a 45	54 a 67	33 a 41	44 a 54	41 a 49	67 a 77
	XL	26 a 29	40 a 48	56 a 69	36 a 44	46 a 56	44 a 52	69 a 79
	XXL	29 a 32	43 a 51	62 a 75	-	-	-	-



Tamanhos		Tornozelo B	Gêmeos C	Coxa M	Anca
Collant	S	19 a 22	30 a 38	45 a 58	≤ 100
	M	22 a 24	33 a 41	49 a 62	≤ 107
	L	24 a 26	37 a 45	54 a 67	≤ 114
	XL	26 a 29	40 a 48	56 a 69	≤ 121

Altura			
	1/2 Perna	Perna	Tamanho
	A - D	A - G	
Normal	≤ 40	≤ 75	36/40
Longo	≥ 40	≥ 75	37/41